


Der fremde Faden




Beschreibung der Unterstützungs-Maske

Die Unterstützungs-Maske von *Der fremde Faden* ist ein Behelf-Mund-Nasen-Schutz (BMNS). Vor dem ersten Gebrauch muss sie 5 Minuten in kochendem Wasser sterilisiert werden, da sie in Handarbeit und nicht keimfrei hergestellt ist. Sie ist aus zwei Stofflagen gefertigt und nach vorne leicht gewölbt. Mit Bändern um die Ohren findet die Maske ihren Halt. Abstand halten, gute Handhygiene, Husten- und Nies-Etikette sind auch mit Maske weiterhin unerlässlich.

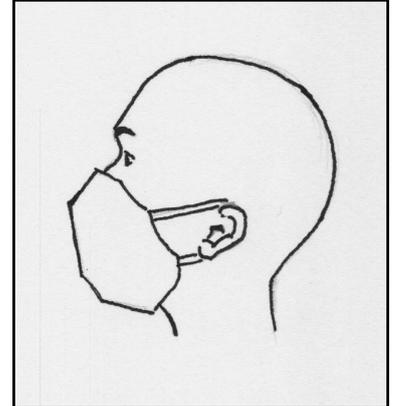

Die Maske muss trocken gelagert und ausschließlich mit sauberen Händen auf- und abgesetzt werden. Beim Absetzen die Außenfläche nicht berühren. Nach dem Tragen sind die Masken bei 60°C in der Maschine zu waschen oder 5 Minuten zu kochen.

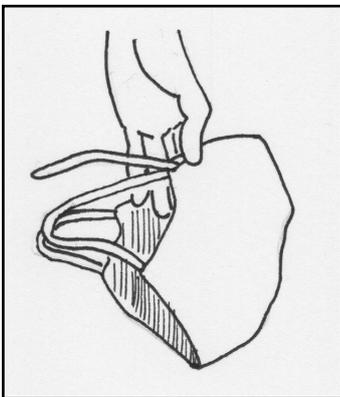

Für den guten Sitz hat die Maske ein Nasenblech. Es wird zum Waschen herausgenommen, damit Rost den Stoff nicht einfärbt (siehe Abbildung). Zum Aufsetzen ziehst Du die Ohrhalterung erst über das eine und dann über das andere Ohr, passt das Nasenblech individuell an, dann ziehst du die Maske unterm Kinn zurecht.

Serien:

Die Serien-Masken sind in größeren Auflagen gefertigt.

Unikate:

Unikat-Masken sind aus meiner Stoffesammlung in sehr kleinen Auflagen gefertigt. Sie sind bei 60°C waschbar, müssen aber mit ähnlichen Farben gewaschen werden. Ich empfehle 5-minütiges Kochen.

Größen:

Jugendliche bis 16 Jahre tragen S, M tragen Männer bis 21 und Frauen. Männer tragen in der Regel L und XL. Kindergrößen gibt es auf Anfrage.

Überweisung an: Kontoinhaberin Maja Peltzer, IBAN DE57 5108 0060 0035 3073 04, BIC DRESDEFF510 (Dresdner Bank Wiesbaden).